



F

ONE-STEP

ONE-STEP est une méthode très moderne, simple et efficace pour l'entretien quotidien des lentilles de contact.

En se basant sur l'action désinfectante du peroxyde d'hydrogène et sur l'action simultanée d'un comprimé, dont la formule a été soigneusement étudiée, on obtient une augmentation de l'effet désinfectant, un fort accroissement de l'effet nettoyant (à caractère sélectif sur les dépôts de protéines), et une lente et totale neutralisation du peroxyde qui est transformé en une solution saline parfaite :

- pH neutre
- Isotonique avec les larmes
- Sans conservateurs d'aucun type

Ainsi, les lentilles parfaitement propres, désinfectées, hydratées et avec leurs paramètres originels peuvent être mises directement sur l'œil.

LE SYSTÈME ONE-STEP contient:

- Un flacon de solution ← 1
- Un sachet de comprimés ← 2
- Un étui à soupape élastique ← 3

MODE D'EMPLOI.

- Remplir l'étui jusqu'au repère avec la solution ONE-STEP. ← 4
- Placer les lentilles dans les alvéoles correspondantes. ← 5
- Ajouter un comprimé dans l'étui et fermer en vissant le couvercle. ← 6
- Agiter l'étui pendant quelques secondes. ← 7

Ne jamais utiliser la solution sans le comprimé neutralisant.

- Attendre au moins deux heures pour que le processus de nettoyage, de désinfection, et de neutralisation soit terminé. ← 8
- Les lentilles peuvent être utilisées au bout de deux heures, ou rester toute la nuit dans l'étui. ← 9
- Agiter l'étui pendant quelques secondes. ← 10
- Avec les mains fraîchement lavées et sans aucun reste de savon, retirer les lentilles des compartiments et les remettre. ← 11
- Vider le contenu de l'étui et le rincer à l'eau courante. Fermer l'étui vide jusqu'à nouvel usage. ← 12

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant de manipuler vos lentilles de contact, veuillez respecter toutes les mesures d'hygiène appropriées (par exemple, se laver les mains).
- Éviter que la solution initiale n'entre en contact prolongé avec la peau. Si nécessaire, laver à l'eau courante.
- Une fois le processus de nettoyage et de désinfection terminé, les lentilles continuent à tremper dans une solution stérile SANS CONSERVATEURS.
- Si les lentilles ne sont pas utilisées quotidiennement, et afin d'éviter toute contamination éventuelle, il est conseillé de remplacer la solution de l'étui par une solution conservatrice, par exemple, SOLUTION SALINE.
- LA SOLUTION SALINE peut aussi être utilisée pour rincer les lentilles si nécessaire (chute accidentelle des lentilles, retrait temporaire des yeux, etc.), au lieu de réaliser un processus de désinfection avec ONE-STEP.
- Pour des cas exceptionnels, où la physiologie de l'utilisateur pourrait causer des dépôts de protéines en quantité qui ne pourraient pas être éliminés totalement avec le système ONE-STEP, le traitement pourrait être complété par un nettoyage déprotéinisant, pour lequel l'utilisation d' ENZYME est adéquate, sur avis de son spécialiste.