



Oxysept® Comfort

mit Vitamin B12 Indikator

Oxysept® Comfort ist die perfekte Pflege für weiche Kontaktlinsen. Desinfektionssicherheit mit Wasserstoffperoxid, die Sicherheit durch den zartrosa Vitamin B12 Indikator eine Neutralisationstablette hinzugefügt zu haben, die Freiheit von Konservierungsstoffzusätzen und das Plus für mehr Frische und Feuchtigkeit machen Oxysept® Comfort so wohltuend verträglich. Oxysept® Comfort - Freude am Kontaktlinsentragen

Gebrauchsinformation:

Bitte waschen und trocknen Sie Ihre Hände immer gründlich bevor Sie Ihre Linsen berühren.

Die tägliche Pflege (Desinfizieren und Neutralisieren):



1. Legen Sie die Linsen in das entsprechende Körbchen (blau/L für die linke Linse und weiß/R für die rechte Linse) und verschließen Sie die Körbchen. Achten Sie darauf, daß die Linsen nicht zusammengedrückt werden.



2. Füllen Sie den Linsenbehälter exakt bis zur Markierung mit Oxysept® Comfort Desinfektionslösung auf.



3. Geben Sie eine Oxysept® Comfort Neutralisationstablette hinzu.

4. Verschließen Sie den Kontaktlinsenbehälter. Die Linsen befinden sich nun in den verschlossenen Körbchen (siehe Schritt 1) und lagern in Oxysept® Comfort Lösung.



5. **Um eine Desinfektion des gesamten Behälters sicherzustellen, drehen Sie den verschlossenen Behälter mindestens dreimal so, daß die Flüssigkeit die Innenseite des Deckels benetzt. Vergewissern Sie sich, daß sich die Tablette nach der Deckeldesinfektion noch in der Lösung befindet**, damit die Neutralisation beginnen kann. Nach ein paar Minuten bilden sich Luftblasen an der Tabletten-Oberfläche. Schaumbildung ist möglich. Eine leicht rosa Tönung der Lösung zeigt Ihnen, daß Sie eine Tablette in den Behälter gegeben haben und daß diese sich aufzulösen beginnt. **Die rosa Tönung ist kein Zeichen dafür, daß die Neutralisation abgeschlossen ist. Ist die Lösung farblos, wurde entweder keine Tablette hinzugefügt oder die Tablette hat sich nicht aufgelöst.**



Für maximalen Comfort belassen Sie die Linsen bitte über Nacht oder, wenn Sie eine schnellere Desinfektion und Neutralisation wünschen, mindestens 6 Stunden nach Zugabe der Tablette in der Lösung, um eine vollständige Neutralisation zu gewährleisten.



6. Bevor Sie die Linsen entnehmen, sollten Sie den Linsenbehälter kurz auf den Deckel stellen. Damit wird sicher gestellt, daß der Linsenbehälter vollständig neutralisiert wird. Ihre Linsen sind jetzt gepflegt und bereit fürs Tragen.

7. Die gebrauchte Lösung nach dem Aufsetzen der Linsen wegschütten, den gesamten Linsenbehälter mit steriler Kochsalzlösung ausspülen und an der Luft trocknen lassen.

Aufbewahrung:

Die Linsen können im ungeöffneten Linsenbehälter maximal 7 Tage aufbewahrt werden. Bei längerer Lagerung führen Sie bitte alle sieben Tage und nochmals vor dem Einsetzen der Linsen eine vollständige tägliche Pflege (Schritte 1-7) durch.

Die wöchentliche Pflege für perfekt gereinigte Kontaktlinsen

Die Protein Entfernung:

Die in Ihrem natürlichen Tränenfilm enthaltenen Proteine (Eiweiße) können sich während des Tragens auf Ihren Kontaktlinsen ablagern. Diese Ablagerungen können den Tragekomfort, das Sehen und die Lebensdauer Ihrer Linsen beeinträchtigen. Die wöchentliche Anwendung von Ultrazyme® Proteinentfernungstabletten pflegt Ihre Linsen optimal.

Die wöchentliche Anwendung von Ultrazyme® Proteinentfernungstabletten pflegt Ihre Linsen optimal.



Geben Sie einmal pro Woche zusätzlich zur normalen Oxysept® Comfort Neutralisationstablette eine Ultrazyme® Proteinentfernungstablette in die Oxysept® Comfort Lösung. Es befinden sich jetzt zwei Tabletten in der Lösung. Folgen Sie nun der normalen täglichen Pflegeroutine (Schritte 1-5). Die Einlagerung der Linsen in dem Proteinentfernungsbad darf nicht länger als 12 Stunden andauern.



Wenn Sie die Linsen aus dem Proteinentfernungsbad nehmen, spülen Sie unbedingt vor dem Aufsetzen beide Seiten Ihrer Linsen unter vorsichtigem Reiben mit steriler Kochsalzlösung ab, um Reste von gelösten Proteinablagerungen zu entfernen. Spülen Sie Ihren Linsenbehälter mit steriler Kochsalzlösung aus und lassen Sie ihn trocknen.

Reinigung des Linsenbehälters:

Zur optimalen Linsenhygiene gehört eine optimale Behälterhygiene. Hierzu sollten Sie den Linsenbehälter einmal wöchentlich reinigen:

- den leeren Behälter mit Oxysept® Comfort Lösung füllen und verschließen (keine Tablette hinzugeben).
- Auf einer unempfindlichen Unterlage den Linsenbehälter umgedreht auf dem Deckel stehen lassen. Bis zur normalen nächsten Pflegeroutine wird der Behälter gründlich desinfiziert.
- Sie können die Lösung zur Pflege (Schritte 1-7) nutzen, da sie nicht neutralisiert wurde.


Vorsichtshinweise:

Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben in der Gebrauchsinformation. Eine Mißachtung kann zu schwerwiegenden Augeninfektionen und -schaden führen.

- Allgemein:

Nur mit dem speziell entwickelten Oxysept® Comfort Linsenbehälter anwenden. Dieser AMO-Linsenbehälter hat im Deckel 3 Löcher um den entstehenden Sauerstoff entweichen zu lassen. Verwenden Sie Oxysept® 1 Comfort nicht für harte oder harte gasdurchlässige Linsen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen Inhaltsstoff allergisch reagieren. Wenn Augenreizungen auftreten, sollten Sie Ihre Kontaktlinsen absetzen und Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen. Vergewissern Sie sich immer, daß die Oxysept® Comfort Tablette sich vollständig aufgelöst hat (leichte rosa Tönung der Lösung) und daß das Sprudeln aufgehört hat, bevor Sie die Linsen aufsetzen. Wenn die Oxysept® Comfort Tablette sich nicht vollständig aufgelöst hat, wiederholen Sie bitte alle Schritte der Desinfektion und Neutralisation. Belassen Sie die Linsen mindestens 6 Stunden nach Zugabe der Tablette in der Lösung, nur dann ist die Lösung sicher neutralisiert und der volle Comfort steht Ihnen zur Verfügung.

- Anwendung:

Bringen Sie unneutralisierte Oxysept® Comfort Lösung oder Ultrazyme® Proteinentfernungslösung niemals direkt ans Auge. Setzen Sie Ihre Linsen auch niemals direkt aus unneutralisierter Oxysept® Comfort Lösung oder Ultrazyme® Proteinentfernungslösung in das Auge. Sollte es dennoch geschehen, so entfernen Sie die Linse bitte umgehend und spülen Sie das Auge mit Wasser aus. Lösung oder Tabletten nicht einnehmen. Verwenden Sie das Produkt nach Ablauf des Verfalldatums (siehe ) nicht mehr. Die Oxysept® Comfort Tabletten sind leicht rosa und etwas gesprenkelt. Ultrazyme® Tabletten sind weiß und etwas gesprenkelt. Verwenden Sie keine Tabletten, die eine ungewöhnliche Farbe oder Aussehen haben, bzw. aufgeweicht oder klebrig sind. Lösen Sie die Ultrazyme® Proteinentfernungstablette nur in Oxysept® Comfort Desinfektionslösung oder Oxysept® 1 Desinfektionslösung auf. Kontaktlinsen oder Linsenbehälter nie mit Leitungswasser spülen.

- Aufbewahrung:

Bitte trocken und bei Raumtemperatur aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- Aufbrauchfrist:

60 Tage nach Öffnen einer Oxysept® Comfort Flasche verbliebene Lösung nicht mehr verwenden.

Produkt:

Oxysept® Comfort Desinfektionslösung:
Oxysept® Comfort Neutralisationstabletten

enthält:

Wasserstoffperoxid 3 %, abgestimmt auf die Verwendung mit Oxysept® Comfort Neutralisationstabletten:
Catalase 0.1 mg/Tablette

Für den Oxysept® Comfort Ultrapack zusätzlich:

Ultrazyme® Proteinentfernungstabletten:

Subtilisin A 0.4 mg/Tablette

Für die Oxysept® Comfort Erstausrüstung zusätzlich:

Ultrazyme® Proteinentfernungstabletten:

Subtilisin A 0.4 mg/Tablette

Lens Plus® Purite® Kochsalzlösung:

Purite® 0.05 mg/ml



Gebrauchsinformation Bitte aufmerksam lesen

LENS PLUS® PURITE® Kochsalzlösung. Diese innovative Abspüllösung für alle Kontaktlinsen - mit dem patentierten Inhaltsstoff PURITE® - ist besonders sanft zu Ihren Augen. LENS PLUS® PURITE Kochsalzlösung ist die natürliche Wahl zum Abspülen Ihrer Kontaktlinsen nach der Desinfektion. Es ist auch ideal zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten.

Bitte waschen Sie sich vor der Kontaktlinsen-Pflege sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab.

Abspülen:

Spülen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen nach der Reinigung und Desinfektion gründlich mit LENS PLUS® PURITE® ab. Danach können die Kontaktlinsen aufgesetzt werden.

Hitzedesinfektion:

Füllen Sie den Linsenbehälter wie angegeben mit LENS PLUS® PURITE®. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Hitzedesinfektionsgerätes.

Auflösen von Proteinentfernungstabletten:

Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur korrekten Anwendung der Proteinentfernungstabletten.

Vorsichtshinweise:

- LEIMS PLUS® PURITE® ist nicht geeignet für die Kaldesinfektion von Kontaktlinsen.
- Verwenden Sie LENS PLUS® PURITE® nicht, wenn Sie auf einen Inhaltsstoff allergisch reagieren.
- Wenn Augenreizungen auftreten, sollten Sie Ihre Kontaktlinse absetzen und Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.
- Verwenden Sie immer frische Lösung.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze der Flasche nicht berühren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Flasche nach Gebrauch sofort fest verschließen.
- Die 90 Tage nach dem ersten Öffnen verbliebene Restmenge nicht mehr verwenden.
- Bitte bei Raumtemperatur und für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Advanced Medical Optics
AMO Ireland, Sweepstakes Centre, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.
© and ™ are owned by Advanced Medical Optics

CE 0050

71330EW11K