

Nützliche Informationen zum Auf- und Absetzen Ihrer Kontaktlinsen mit Perfect Aqua Plus

Kontaktlinsen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Europaweit werden jedes Jahr mehr als eine Million neuer Kontaktlinsenpaare verkauft. Sie bieten ein Plus an Lebensqualität während der Arbeitszeit und bei Sport- oder Freizeitaktivitäten.

Damit Sie viel Freude an Ihren wertvollen Kontaktlinsen haben, hat Ihnen Ihr Kontaktlinsenspezialist das moderne Pflegemittel Perfect Aqua Plus empfohlen.

Die natürlichen Inhaltsstoffe Hyaluronat und Allantoin sorgen für eine gute Befeuchtung der Kontaktlinse während des Tragens und schützen das empfindliche Auge. So sind Ihre Kontaktlinsen auch über lange tägliche Tragezeiten optimal verträglich.

Das patentierte Perfect-Aqua-Plus-Konzept sorgt für eine effektive Reinigung und Desinfektion Ihrer Kontaktlinsen; gleichzeitig unterstützt die moderne Pflege auch Ihre Augengesundheit.

Bitte lesen Sie die beigefügten Pflegetipps aufmerksam und befolgen Sie die folgenden Anweisungen. Durch eine systematische Pflege mit Perfect Aqua Plus verlängert sich die Lebensdauer Ihrer Kontaktlinsen und die Verträglichkeit bleibt über die gesamte Tragezeit erhalten.

Aufsetzen der Kontaktlinsen

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Hände gründlich waschen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

- 1 Die erste Kontaktlinse aus dem Behälter nehmen und mit Perfect Aqua Plus abspülen.
- 2 Kontaktlinse auf gleichmäßige Befeuchtung, Risse und Einkerbungen hin überprüfen. Wenn die Kontaktlinse umgestülpt sein sollte, bringen Sie sie gegebenenfalls wieder in die richtige Form.
- 3 Ist augenscheinlich alles in Ordnung, kann die Kontaktlinse aufgesetzt werden.

Die zweite Kontaktlinse bitte ebenso handhaben. Halten Sie beim Auf- und Absetzen von Kontaktlinsen immer eine bestimmte Routine ein, um Verwechslungen zwischen links und rechts zu vermeiden. Beginnen Sie zum Beispiel immer mit der rechten Kontaktlinse.

- 4 Behälter entleeren; intensiv mit Leitungswasser abspülen und geöffnet trocknen lassen. Dieses Pflegemittel nicht gleichzeitig mit Pflegemitteln anderer Hersteller anwenden.

Absetzen der Kontaktlinsen

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Hände gründlich waschen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

- 5 Die erste Kontaktlinse vom Auge nehmen.
- 6 Einige Tropfen Perfect Aqua Plus auf die Kontaktlinsen geben und mit dem kleinen Finger der anderen Hand vorsichtig reiben. Diese Pflegeempfehlung ist sehr wichtig, da sie über 99% der Verunreinigungen entfernt.
- 7 Die Kontaktlinsen mit Perfect Aqua Plus gründlich abspülen.


Kontaktlinse in den Behälter legen.


Mit der zweiten Kontaktlinse ebenso verfahren.



Behälter mit Perfect Aqua Plus bis zum Rand / Markierung (je nach Behälter) füllen und verschließen.

6 Stunden oder über Nacht einwirken lassen: So werden schädliche Mikroorganismen zerstört.

Die Kontaktlinsen können bis zu 30 Tage im Perfect Aqua Plus Bad lagern. Bei einer länger andauernden Lagerung die Desinfektion wiederholen.

 **Bitte unbedingt die Anwendungshinweise des Herstellers auf dem Produkt beachten.**

 **MPG&E** Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Kontaktlinsen.

 LAPIS LAZULI Int. NV, Damsluisweg 48, NL-1332 ED Almere.  0473

