

Unicare® All-in-One Lösung ist eine ausbalancierte, sterile Kontaktlinseflüssigkeit für die tägliche Pflege aller weichen Kontaktlinsen. Beseitigt Verunreinigungen auf der Linsenoberfläche und desinfiziert zuverlässig mit antimikrobiellem BACTAC°. Durch ihren konstanten pH-Wert im Bereich der natürlichen Tränenflüssigkeit ist Unicare® All in One Lösung schonend für die Augen und sorgt für dauerhaften Tragekomfort.

**Hinweis**

- Nicht verwenden, wenn der Originalitätsverschluss beschädigt ist.
- Nach Öffnen der Flasche den Inhalt innerhalb von 90 Tagen aufbrauchen. Flasche noch der Verwendung schließen.
- Nach jeder Desinfektion die Lösung im Linsenbehälter erneuern,
- Bei Zimmertemperatur lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Augenreizungen die Anwendung abbrechen und Arzt oder Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.
- Nicht verwenden bei allergischer Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe,
- Ausschließlich für weiche Linsen verwenden.

LOT : Siehe Packungsboden

**Zusammensetzung:**

BACTAC© 0,008%, NaCl. Polaxon er 0,4%.  
EDTA 0,1%, Puffer, Wasser.

STERILE A

UBA 34400001  
PZN: 1267107  
UCBD240D05.11V6D

CE 0336



## **Gebrauchsinformation**

Vor der Anwendung Hände gründlich reinigen und abtrocknen.

### **Reinigen**

Einige Tropfen **Unicare®** auf die Kontaktlinse geben und vorsichtig sauber reiben. Gründlich mit frischer Lösung abspülen; um gelöste Rückstände zu entfernen. Bei Zwischendurchreinigung können die Linsen nach dem Abspülen direkt eingesetzt werden (kein Ersatz für die regelmäßige Desinfektion).

### **Desinfizieren**

Kontaktlinsen mind. 6 Stunden (z.B. über Nacht) im **Unicare®** Linsenbehälter lagern. Anschließend direkt ins Auge einsetzen.

### **Aufbewahren**

Bei Nichtgebrauch die Kontaktlinsen in **Unicare®** All-in-One Lösung aufbewahren.

### **Benetzen**

Bei Bedarf 1 Tropfen **Unicare®** All-in-One Lösung auf die Innenfläche der Linse geben und wieder einsetzen.

**Vollständige Gebrauchsanweisung**  
Siehe Flaschenetikett

Hersteller:  
Valeant Pharmaceuticals Benelux &  
Scandinavia B.V., Zontermeer, Niederlande

Vertrieb:  
Valeant Pharmaceuticals Germany GmbH

